


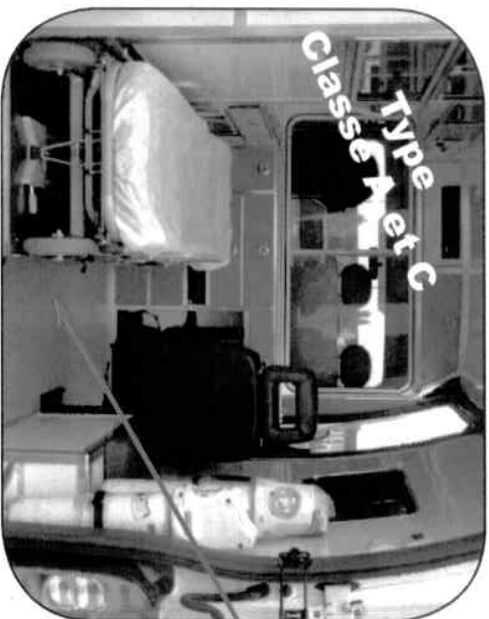

# PROTOCOLE AMBULANCE



### SURFANIOS

*Détergent et désinfectant des sols*

- Bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276, pr EN 13713, NF T 72-170, NF T 72-190, T72-190, T 72-300, Actif sur B.K.
- Fongicide selon NF T 72-200, T 72-300, NF T 72-190, NF EN 1275 (Candida albicans).
- Virucide : Actif sur les virus HIV-1 et HBV.

**Mode d'emploi :** S'emploie à la dilution de 0,25% ; soit 1 sachet dose de 20 ml pour un seau de 8 litres d'eau ou une dose de 10 ml pour un seau de 4 litres d'eau. Ne pas rincer



### WIP'ANIOS

*Nettoyage et désinfection du matériel non immergeable*

La solution d'imprégnation est :

- Bactéricide : NF EN 1040,
- Fongicide selon NF EN 1275 (Candida albicans),
- Virucide : Actif sur HIV-1, Herpès virus et Rotavirus.

**Mode d'emploi :**  
Produit prêt à l'emploi, à usage unique. Ne pas rincer.

### DETERGENT DESINFECTANT SURFACES HAUTES

*Nettoyage et désinfection surfaces et plans de travail*

- Bactéricide : NF EN 1040, NF T 72-190, NF T 72-170, et NF EN 1276, T 72-300, Actif sur B.K
- Fongicide selon NF EN 1275, T 72-301 et NF 1650
- Virucide : actif sur le virus HIV-1, HBV, Herpès virus et Rotavirus.

**Mode d'emploi :**

- Produit prêt à l'emploi.
- Pulvériser uniformément sur la surface à traiter.
- Frotter la surface à l'aide d'une chiffonnette.

